

➤ *Invacare*® **Flo-tech Solution Xtra**
Almofada e Sistema Modular

Combina excelentes propriedades de redistribuição da pressão com a promoção de uma correcção activa e uma gestão da postura

A nova Almofada *Invacare*® **Flo-Tech Solution Xtra e Sistema Modular** foi desenvolvida em parceria com clínicos, para satisfazer as necessidades individuais da postura de utilizadores de cadeiras de rodas. Através do uso deste sistema modular, as intervenções terapêuticas podem ser realizadas de uma forma mais eficaz, aumentando a função, maximizando o conforto e preservando a integridade da pele.





➤ **Desenhada para promover correcção activa e gestão da postura**

Os componentes modulares são concebidos de espuma CMHR de Alta densidade. Eles são utilizados para conseguirmos correcção e gestão da postura. As cunhas possuem marcas e fixações de velcro. Elas podem assim ser cortadas para responder às necessidades dos utilizadores. A aplicação das cunhas por debaixo da almofada combinado com a disposição dos componentes modulares por cima oferece uma grande variedade de soluções para terapeutas que se esforçam para obter controlos posturais específicos.



➤ **Um saco, de gel, duplo cobre toda a superfície da almofada**

A área de contacto entre o utilizador e a almofada é protegida, o gel redistribui a pressão para fora das proeminências ósseas. A camada de gel adicional é incorporada por debaixo da zona vulnerável das tuberosidades esquiais e sacro, para uma redução mais significativa da pressão e aumentar qualidades a esta almofada, tornado-a assim a almofada ideal para utilizadores com risco elevado de aparecimento de escaras.

➤ **Fitas de velcro para facilitar a colocação dos componentes modulares**

Fitas de velcro foram adicionadas na parte superior e inferior da base da almofada para permitir a fixação dos componentes modulares “Xtras” (Extras). Todos os componentes foram concebidos com espuma CMHR de Alta densidade e fitas de velcro para assegurar que eles permaneçam na posição definida, sobre a almofada, mesmo após o uso repetido da mesma.



➤ **Design da capa**

A capa é fabricada num material resistente e impermeável, que evita que os líquidos a molham. Ela tem um novo design que permite a sua expansão e a sua adaptação aos vários componentes adicionados assegurando desta forma que o utente se afunde bem na almofada e tire proveito das vantagens dos componentes. Outra característica interessante são os dois fechos com cores distintas :

- Azul para abertura da cobertura
- Verde para expansão.

A capa pode ser aberta tanto por cima como por baixo para ajustar os componentes quando necessário.

Opções



Nivelador pélvico

O nivelador pélvico pode ser inserido em qualquer dos lados do poço esquel, debaixo do gel para ajudar na correção ou acomodação das obliquidades pélvicas.



Suporte de anca

O suporte de anca pode ser usado em qualquer dos lados da parte traseira da almofada, seguro por velcro e usado uni ou bilateralmente para estimular alinhamentos á linha media e alinhamento pélvico.



Adutor

O adutor pode ser usado em qualquer dos lados na parte frontal da almofada, seguro por velcro e usado uni ou bilateralmente para reduzir rotação externa e abdução das pernas.



Abdutor Standard ou Alto

O abdutor pode ser colocado na frente da almofada para aumentar à abdução já existente na almofada, para ajudar no alinhamento dos fémures, mantém integridade das articulações pélvicas e pode ajudar na espasticidade.



Base Rígida

A base rígida é para ser colocada por baixo da almofada (incluindo as cunhas) - Mantém uma base firme para maximizar os efeitos dos componentes.




Saco de Fluido

Um saco de fluido pode ser inserido no poço esquel. Poderão ser utilizados dois sacos para colocações específicas. Colocação na frente - Evita deslizar para a frente / Atrás - Ajuda na redistribuição da pressão no sacro / De lado - Para obliquidades pélvicas flexíveis.



Cunhas de Canto

Podem ser usadas em qualquer canto da almofada. Pode ajudar na rotação lateral da anca e alinhamento das coxas. Pode ser usado debaixo de um das pernas para pequenas diferenças de flexo na anca .

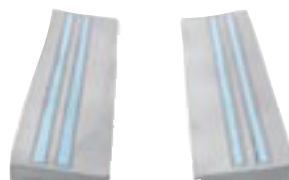

Cunhas Laterais


As cunhas laterais são colocadas debaixo da base da almofada. Têm que ser ajustadas ao tamanho da mesma. Elas facilitam a estabilidade lateral da pélvis e da anca bem como promovem um posicionamento mais contour.




Cunha Frontal

A cunha frontal é colocada debaixo da base da almofada. Tem que ser ajustada ao tamanho da almofada. Ajuda na estabilização pélvica e acomoda basculação pélvica posterior bem como reduz a basculação pélvica anterior.

Informação técnica

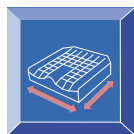

Vários tamanhos disponíveis: 44

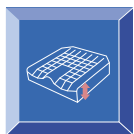

7.8 cm



3.08 kg



152 kg



71°

Capa impermeável e transpirável.

Fabricado segundo Normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores



Tecido preto
Impermeável



Dartex® Cinza Escuro